

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	03-16955	No. 140618
--------	----------	------------

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店	機 種	ONW-10
所在地	大阪府貝塚市畠中1-3-18	機 番	000955
ユーザー名	なかいクリニック 様	納 入 日	平成18年4月6日
点検者	中澤一裕	作 業 時 間	
		受 付 日	平成26年3月10日
返送先	納入先と同じ	出 荷 日	平成26年6月16日

修理依頼・不具合内容

洗浄終了後に水槽内に水が残る

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

洗浄終了時の排水工程で、排水時間が遅く、排水開始と停止を繰り返す現象を確認しました。分解点検したところ、水を検知する水位センサーと排水シリコンチューブが劣化しており、これが原因で不具合が発生しました。

写真1：修理部品一式



写真2：定期交換部品



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.44～0.58 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.6% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.110～0.192 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転動作確認・・・正常 運転カウンタ 5776
- オゾンインジケータ変色・・・正常

交 換 部 品

部品番号	部品名称	数量	備 考
	水位レベルセンサー（L、H、HH）	3本	
	排水シリコンチューブ	1本	
	フタスプリング	4個	
	フィルター1（水槽下側）	1個	
	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		ドレンフィルタは本体交換
	フタパッキン	1枚	今回無償

承認

安
26.6.18
田

審査

中
26.6.18
澤

作成

H26.6.18

中澤