

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-17429

No. 140609

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店	殿	機種	ONW-10
所在地	兵庫県揖保郡太子町立岡123		機番	000928
ユーザー名	二ノ丸内科 様		納入日	平成18年1月16日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年5月30日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成26年6月5日

修理依頼・不具合内容

- ・本体左側面より、吹くように水が漏れた

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

内部点検の結果、水漏れの原因となるような不具合はありませんでした。

本体左側の水が漏れた形跡から、洗浄チューブなどが外れてそこから水が写真1の穴に当たり写真2の「通気配管」を経由して内部側に漏れたと推測いたします。
噴き出しを防止するために通気配管の流路を狭くする対策をいたしました。

写真1：水槽左側の穴



写真2：本体左側 通気配管



※ご説明用に別の機械の写真を使用しています

〔2〕修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.42～0.56mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.109～0.191 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

承認



審査



作成

H26.6.9

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	排水シリコンチューブ	1	分解点検に伴うため無償