

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-17482

No. 140626

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	大阪府東大阪市長田西4-3-13		機番	000296
ユーザー名	ながはら病院 様		納入日	平成15年4月30日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年6月9日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成26年6月24日

修理依頼・不具合内容

- ・本体内部より水漏れ
(平成26年5月28日定期点検作業実施)

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水ポンプ(P-1) 出口側で、オゾンガスが通るアスピレータチューブに亀裂が発生しておりそこから水が漏れていました。このチューブを交換して復旧しました。

そのほかの配管、チューブ類に亀裂は見られませんでした。年数も経っているため次回点検時は交換をご検討ください。

写真：アスピレータチューブ；水漏れ箇所



[2] 修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.49～0.53mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.111～0.202 MPa (AC100V 60Hz)
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常（ご参考用にインジケータを機械に同梱しています）

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	アスピレータチューブ	1本	
	水槽キャップパッキン	1枚	

承認

安
26.6.26
田

審査

中
26.6.26
澤

作成

H26.6.26

中澤