

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 6月 23日

|       |                                                                               |           |                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10                                                             | 製造番号      | : 657                                                            |
| 作業年月日 | 平成 26年 6月 23日                                                                 | 作業時間      | : Hr                                                             |
| 顧客名   | 脳神経リハビリ北大路病院 御中                                                               | 電話番号      | : 075-781-5111                                                   |
| 所在地   | 京都府京都市左京区一乗寺西水干町25-2                                                          | ご担当       | 院長先生 様                                                           |
| 販売店   |                                                                               | ご担当       | 様                                                                |
| 納入年月日 | 平成 16年 7月 1日                                                                  | 保証期間      | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6年 1回目 | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                   | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>                                         |

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 点検項目                                              | 点検項目                                             |
| 電源釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        | オゾン分解ファン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  |
| フィルタリセット釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | 排水 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 運転/停止釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    |
| アルコールモード釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | オゾンインジケータ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 操作パネル 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 酸素発生 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      |
| 蛍光灯 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        | 水漏れ確認 装置外 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 水漏れ確認 装置内 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水 正常 <input checked="" type="checkbox"/>         | 洗浄コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 細管洗浄 順方向 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | 洗浄チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 細管洗浄 逆方向 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   |                                                  |
| 細管洗浄 エアパージ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                  |
| アルコールフラッシュ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                  |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                         |                                                  |

|      |                |                         |                   |
|------|----------------|-------------------------|-------------------|
| 装置情報 | 総運転回数: 1,369 回 | 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施 | 交換後運転回数: 106 回    |
| 酸素発生 | 濃度: 94.8 %     | 流量: 0.79 L/min          | 圧力: 109 ~ 199 MPa |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品製造番号                      |
|----------|-------|-------------------------------------|----|-------------------------------|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | 吸着筒・吸湿筒                       |
| ドレン用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | NO. SPS-10851 → NO. SPS-11530 |
| 吸着筒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 | オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし       |
| 吸湿筒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |                               |
|          |       | <input type="checkbox"/>            |    |                               |

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                        | 26年 6月 27日                                                                            |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |                                                                                       |
| ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |                                                                                       |
| ご署名                              |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |