

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 7月 14日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300147
作業年月日	平成 26年 7月 14日		作業時間	: Hr
顧客名	芦屋セントマリア病院 御中		電話番号	: 0797-23-1771
所在地	兵庫県芦屋市大原町5番20号		ご担当	院長先生 様
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 25年 11月 28日	保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品	
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> パルス数 361
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 180 回	更新(リセット)実施・未実施 <input checked="" type="checkbox"/>	消毒: 102 回	消毒+アル: 79 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 35 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 5 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		<input type="checkbox"/>	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
給水フィルター		<input type="checkbox"/>	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
脱気フィルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1枚	コネクタ継手の4点は製造番号なし
		<input type="checkbox"/>		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2014年 7 月 14 日

ご署名 藤川

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山