

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 7月 3日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300030	
作業年月日	平成 26年 7月 3日		作業時間	:	Hr
顧客名	山縣クリニック 御中		電話番号	: 0795-80-3675	
所在地	兵庫県丹波市市島町上竹田1099-1		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 7月 18日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック 正常 ☒
 酸素ライン 正常 ☒
 アルコールライン 正常 ☒
 オゾンセンサ 正常 ☒
 給水ライン 正常 ☒
 濃度計流量 正常 ☒
 水位センサー 正常 ☒
 水漏れ確認 正常 ☒
 清掃 正常 ☒
 トレー 正常 ☒
 殺菌槽コネクタ 正常 ☒

殺菌槽 LED 正常 ☒
 エアライン 正常 ☒
 オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 709
 排水栓、排水ライン 正常 ☒
 細管送水ライン 正常 ☒
 排気ライン 正常 ☒
 オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
 異常音、振動 正常 ☒
 電源コード 正常 ☒
 殺菌チューブ類 正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 877回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 159回	消毒+アル: 718回
	リークチェック: 745回	自己洗浄: 264回	アルコール単独: 0回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12020900 → NO.10050252
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO.120711-027 → NO.140606-005
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、 コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒669-4811 兵庫県丹波市市島町上竹田1099-1

山 縣 ク リ ニ ッ ク
 山 縣 憲 一

ご署名 TEL.0795-80-3675 FAX.0795-80-3676

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山