

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 7月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100791	
作業年月日	平成 26年 7月 2日		作業時間	:	Hr
顧客名	西成民主診療所 御中		電話番号	: 06-6659-1010	
所在地	大阪府大阪市西成区松2丁目1-7		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 7月 3日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴																																													
不具合原因、作業内容																																													
点検項目 <table border="0"> <tr> <td>フタロック</td> <td>正常 ☒</td> <td>殺菌槽 LED</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>酸素ライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>エアライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>アルコールライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>オゾン水濃度計動作</td> <td>正常 ☒ パルス数 501</td> </tr> <tr> <td>オゾンセンサ</td> <td>正常 ☒</td> <td>排水栓、排水ライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>給水ライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>細管送水ライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>濃度計流量</td> <td>正常 ☒</td> <td>排気ライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>水位センサー</td> <td>正常 ☒</td> <td>オゾン濃度</td> <td>正常 ☒ 履歴 0.69 ppm</td> </tr> <tr> <td>水漏れ確認</td> <td>正常 ☒</td> <td>異常音、振動</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>清掃</td> <td>正常 ☒</td> <td>電源コード</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>トレイ</td> <td>正常 ☒</td> <td>殺菌チューブ類</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>殺菌槽コネクタ</td> <td>正常 ☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 501	オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm	水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒																																										
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒																																										
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 501																																										
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒																																										
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒																																										
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒																																										
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm																																										
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒																																										
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒																																										
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒																																										
殺菌槽コネクタ	正常 ☒																																												
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項																																													

装置 情報	交換後運転回数: 151回	更新(リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 69回	殺菌+アル: 82回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 5回	アルコール単独: 1回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12051012 → NO. 13051385
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 120516-013 → NO. 140609-004
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
2014年 7月 2日 ご署名 <u>杉江 健</u>	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山