

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 7月 23日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 296
作業年月日	平成 26年 7月 23日		作業時間	: Hr
顧客名	ながはら病院 御中		電話番号	: 06-6744-0111
所在地	大阪府東大阪市長田西4丁目3番13号		ご担当	院長先生 様
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 15年 4月 30日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☒		

点検項目		点検項目	
電源釦	正常 ☒	オゾン分解ファン	正常 ☒
フィルタリセット釦	正常 ☒	排水	正常 ☒
運転/停止釦	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
アルコールモード釦	正常 ☒	オゾンインジケータ	正常 ☒
操作パネル	正常 ☒	酸素発生	正常 ☒
蛍光灯	正常 ☒	水漏れ確認 装置外	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	水漏れ確認 装置内	正常 ☒
給水	正常 ☒	洗浄コネクタ	正常 ☒
細管洗浄 順方向	正常 ☒	洗浄チューブ	正常 ☒
細管洗浄 逆方向	正常 ☒		
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒		
アルコールフラッシュ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・水漏れが発生した為、P1出口チューブを交換。			

装置情報	総運転回数： 1295回	更新（リセット） 実施・未実施	交換後運転回数： 23回
酸素発生	濃度： 93.6%	流量： 0.81L/min	圧力： 116 ~ 205 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
オゾン分解触媒		☐	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☐	一式	NO, → NO,
吸着筒		☐	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☐	一個	
P1出口チューブ		☒	一個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 近藤 雅俊

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山