

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 26年 8月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100573	
作業年月日	平成 26年 8月 8日		作業時間	:	Hr
顧客名	宮崎内科 御中		電話番号	: 072-292-8372	
所在地	大阪府堺市南区高倉台2-5-8		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 2月 1日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐		修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・『E: 205 オーバーフロー異常』が4回発生しリセットしても使用出来ない。			
不具合原因、作業内容			
・コントロール基板の不具合により『E: 205 オーバーフロー異常』が発生しておりました。			
・コントロール基板を交換し正常に運転した事を確認しました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 696
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 125回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌: 36回	殺菌+アル: 351回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 328回	アルコール単独: 1回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
コントロール基板		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、 コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 NO, 0729110892 → NO, 0611410972
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

大阪府堺市南区高倉台2-5-8
宮崎内科
医師 宮崎秀明
ご署名
TEL 072-292-8372
責任技術者 作業者
中山