

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 26年 7月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機　OED－１０００			製造番号	：　１００６４０	
作業年月日	平成　２６年　７月　３０日			作業時間	：　　　　　／　　　　　Hr	
顧客名	杉本医院　御中			電話番号	：　０７２５－３２－３２５１	
所在地	大阪府泉大津市本町４－１７			ご担当	院長先生　　　様	
販売店				ご担当	様	
納入年月日	平成　２５年　３月　１３日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年　　　回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修　理 ☒	点検のみ ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
殺菌中エラーにより強制終了
(、水位低下異常、オーバーフロー異常)

不具合原因、作業内容
コントロール基板の不具合により交換(無償)

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 32 回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 39 回	殺菌+7L: 56 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 80 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. → NO.
コントロール基板		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 NO. 1215110892 → NO. 0611410972
		☐		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H26年 7月 30日

ご署名 杉本 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
和田	中山