

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-17537

No. 140828

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	兵庫県神戸市北区南五葉3-4-22		機番	000369
ユーザー名	豊田胃腸科外科 様		納入日	平成16年3月29日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年6月16日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成26年8月27日

修理依頼・不具合内容

- ・運転していないのに、蛇口を開くと給水が始まる

不具合原因（故障箇所）と処置


[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

給水電磁弁（SV-4）が閉まらない状態を確認し、部品交換して復旧しました。
このほかに性能が劣化した部品を交換しました。

写真1：定期交換部品



写真2：給水電磁弁ダイヤフラム、ポンプ、コンプレッサ ほか

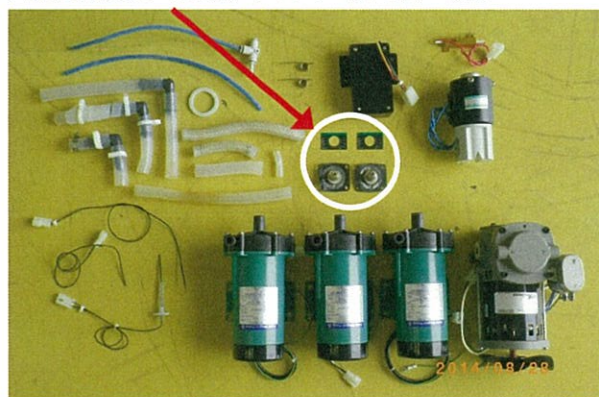

[2] 修理・点検内容

1. オゾン水濃度測定：0.5mg/L・・・正常
2. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.5% 酸素流量：0.81 L/min 圧力：0.109～0.197 MPa（AC100V 60Hz）
3. 運転動作確認・・・正常
4. オゾンインジケータ変色・・・正常

交換部品

番号	部品名称	数量	備考
1	給水電磁弁ダイヤフラム	2個	SV-4、SV-5
2～4	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		SPS-0466⇒SPS-1573
5	水位レベルセンサー	3本	
6、10	排水バルブ用チューブ、配管チューブ、パッキン	1式	
7～9	水ポンプ	3台	P-1、P-2、P-3
11	エアコンプレッサー	1台	
12	オゾンセンサー	1個	
13	排水電磁弁（抵抗 ASSY 含む）	1式	
14	フタスプリング	2個	

承認



審査



作成

H26. 8. 28

中澤