

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-1448

No. 130703

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	和歌山県紀の川市粉河 756-3			機番	000769
環営	ユーザー名	稲穂会病院 様			納入日	平成 17 年 5 月 1 日
	点検者	小野定之	作業時間	6 Hr	受付日	平成 25 年 3 月 12 日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 7 月 3 日
計	2					

修理依頼・苦情内容

・オーバーホール依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

・定期点検およびオーバーホールによる部品交換

（定期交換部品）

吸着筒・吸湿筒・ドレンフィルター
オゾン分解触媒

（オーバーホール部品）

給水電磁弁・排水電磁弁
水ポンプ（P-1, P-2, P-3）
オゾンセンサー

水位レベルセンサー・エア
コンプレッサー・配管チューブ
パッキン・フタスプリング
オゾン発生装置



写真1)



写真2)

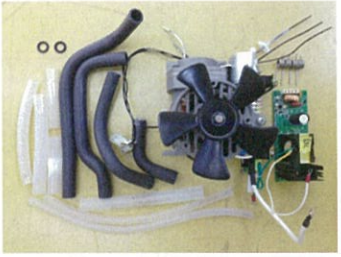


写真3)

[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.40～0.58mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.6 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.107～0.193MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

交換部品

承認
安 25.7.-3 田
審査
中 25.7.-3 澤
作成
小 13.7.03 野

部品番号	部品名称	数量	備考
	定期交換部品	1 式	写真1)
	給水電磁弁	2 個	
	排水電磁弁	1 式	
	水ポンプ（P-1・P-2・P-3）	3 個	
	オゾンセンサー	1 個	
	エアコンプレッサー	1 個	他