

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-16711

No. 141009

納入先	新鋭工業（株）大阪支店 殿			機種	ONW-10
所在地	和歌山県那賀郡紛河町紛河 7 5 6 - 3			機番	000769
ユーザー名	稲穂会病院 様			納入日	平成 17 年 5 月 1 日
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 26 年 1 月 28 日
返送先	納入先と同じ			発送日	平成 26 年 10 月 9 日

修理依頼・異常内容

水槽の底から水漏れ


不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

機械を点検したところ、洗浄槽底部前面側に発生した亀裂を確認しました。
何らかの衝撃が加わって底部が割れたと推測します。
亀裂部分を接着し、その上を溶接して補修しました。（写真をご参照ください）

写真 1：溶接部分拡大

写真 2：水槽全景

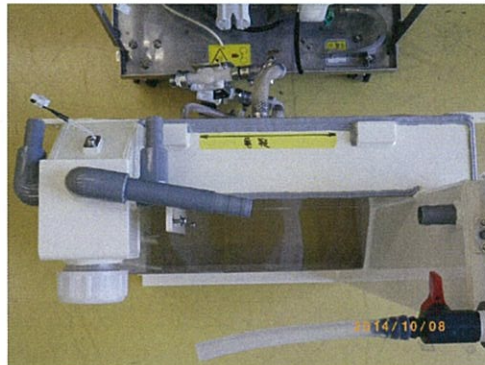

[2] 修理・点検内容

- 部品交換及び水槽補修（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.43～0.59 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.9 % 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.123～0.216 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
- 運転回数：2478

一以上一

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	排水シリコンチューブ	1 本	水槽修理作業に含む

承認

安
14.10-9
田

審査

中
26.10-9
澤

作成

H26. 10. 9

中澤