

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 9月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100504	
作業年月日	平成 26年 9月 2日		作業時間	:	Hr
顧客名	塩津診療所 御中		電話番号	: 0749-88-0341	
所在地	滋賀県長浜市西浅井町塩津浜1458番地		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 24年 8月 20日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	2年	1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 522
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 61 回	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 11 回	殺菌＋アル: 113 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10010080 → NO.10090386
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.130618-009 → NO.140707-004
コントロール基板		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 No.031410892 → No.0521410972

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 本村 井

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山