

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 9月 4日

|       |                               |                               |                                                                  |                |                          |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S          |                               | 製造番号                                                             | : 300046       |                          |
| 作業年月日 | 平成 26年 9月 4日                  |                               | 作業時間                                                             | : Hr           |                          |
| 顧客名   | 大仙病院 御中                       |                               | 電話番号                                                             | : 072-278-2921 |                          |
| 所在地   | 大阪府堺市西区北条町1丁目2番31号            |                               | ご担当                                                              | 院長先生 様         |                          |
| 販売店   |                               |                               | ご担当                                                              | 様              |                          |
| 納入年月日 | 平成 25年 8月 21日                 | 保証期間                          | 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品            |                          |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 年 回目                                                             | 定期点検シール記入      | <input type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>   | 点検のみ.                         |                                                                  | 修理表示貼付         | <input type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水注意 (E:111) が 10回発生。

不具合原因、作業内容

排水ホースが屈曲しかかっていた為、ホースの直径が狭くなり排水の規定時間を超えたのでエラーが発生しました。

点検項目

|          |    |                                     |           |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 493    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |           |    |                                                 |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水ホースが屈曲しにくいよう 結束しました。

|      |               |                  |              |              |
|------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 69 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 651 回    | 消毒+アル: 191 回 |
|      | リークチェック: 0 回  | 自己洗浄: 2 回        | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                       | 数量   | 交換部品製造番号                              |
|-----------|-------|--------------------------|------|---------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO, → NO,                     |
| 排水フィルター   |       | <input type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO, → NO,                     |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/> | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手の4点は製造番号なし |
|           |       | <input type="checkbox"/> |      |                                       |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者



中山