

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成 26年 9月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300101	
作業年月日	平成 26年 9月 10日		作業時間	:	Hr
顧客名	半田クリニック 御中		電話番号	: 072-949-1597	
所在地	大阪府八尾市若林町1-87 アル医療センター 1階		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 9月 26日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 785
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 206 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒: 72 回	消毒+7L: 134 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 5 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12081149 → NO. 12061099
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO. 120801-024 → NO. 110614-026
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26 年 9 月 10 日

半田

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山