

器具除染用洗浄機 IC Washer点検表報告書

お客様用

お客様	名称	ロイヤルティーステンレス7)ニッ7	製造番号	100006	点検実施日	ご承認印	
	住所	東京都品川区南大井3丁目33-10	運転回数	171回	点検実施者		
	納入場所	東京都品川区南大井3丁目33-10	サービス形態	モリタ担当者	東京営業 田嶋様		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作・異音
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリング及びワイヤの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け
- ☒ ドアヒンジの作動
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放ボタンによるドア開放量(100mm以内)

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☐ 薬剤レベルセンサーの配線・コネクタ、配管取付
- ☐ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量(50mL計測)
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチの作動・漏れ
- ☒ 循環水圧力スイッチの作動・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり、樹脂部品の摩耗
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動
- ☒ タッチパネルの色あせ・表示・汚れ・損傷
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグの損傷・よれ
- ☒ 各基板のコネクタの緩み
- ☒ 各コネクタの緩み・各端子の抜け
- ☒ 各配線の変色・損傷・結束
- ☒ ヒーター配線の緩み・損傷・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体とドアの位置関係
- ☐ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン(1年毎)
- ☒ プレフィルタ(2年毎)
- ☒ HEPAフィルタ(2年毎)
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ(1年毎)

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合	・	否
---	---	---

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン	1
洗剤ポンプチューブ	1
仕上剤ポンプチューブ	1



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030