

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-08372

No. 100727

配布先	納入先	新鋭工業（株）大阪支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	和歌山県御坊市湯川町小松原615-1	機番	000538
環営	ユーザー名	紀伊クリニック 様	納入日	平成16年10月1日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日
				平成22年6月4日
計	返送先	納入先と同じ	発送日	平成22年7月25日
3				

修理依頼・異常内容


エラー8（オゾンガス異常）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

エラー8はオゾンセンサの故障が原因で、これを交換して復旧しました。

運転カウンタ：2575回

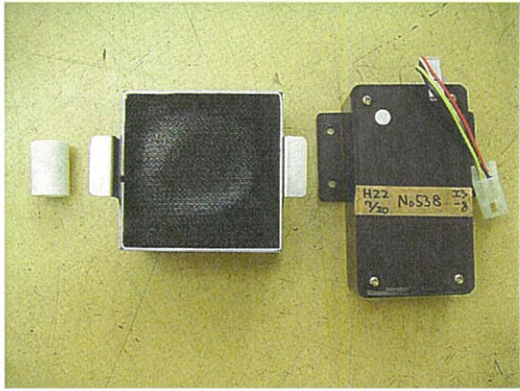

[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- 運転プログラム書換：Ver. 8→Ver. 10
これに伴い12回運転するとフィルターランプが点滅してお知らせします。
- オゾン水濃度測定：0.56～0.48mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・吸着筒、吸湿筒の交換時期が近づいています
酸素濃度：89.5～90.1% 酸素流量：0.73L/min 圧力：0.124～0.217MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾンセンサ	1	
	オゾン分解触媒	1	
	ドレンフィルター	1	

承認

審査

作成

H22.7.27

中澤