

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-17452

No. 141002

納入先	新鋭工業（株）大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	和歌山県御坊市湯川町小松原615-1		機番	000538 (CF用)
ユーザー名	紀伊クリニック 様		納入日	平成16年10月1日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年6月4日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成26年10月1日

修理依頼・異常内容

水槽の底から水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

この度は修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。

機械を点検したところ、洗浄槽底部前面側に発生した亀裂を確認しました。
何らかの衝撃が加わって底部が割れたと推測します。
亀裂部分を接着し、その上を溶接して補修しました。（写真をご参照ください）

写真1：水槽全景



写真2：溶接部分拡大



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換及び水槽補修（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.43～0.58 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.6% 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.123～0.211 MPa (AC100V 60Hz)
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
- 運転回数：3963

—以上—

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	排水シリコンチューブ	1本	水槽修理作業に含む
	排水ポンプ入口チューブ	1本	水槽修理作業に含む

承認



審査



作成

H26.10.2

中澤