

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成 26年 10月 1日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10			製造番号	: 659
作業年月日	平成 26年 10月 1日			作業時間	: Hr
顧客名	横山内科 御中			電話番号	: 073-422-1741
所在地	和歌山県和歌市宇須1丁目5-15			ご担当	院長先生 様
販売店				ご担当	様
納入年月日	平成 16年 6月 22日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7年 1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐		修理表示貼付	☐

点検項目	点検項目
電源釦 正常 ☒	オゾン分解ファン 正常 ☒
フィルタリセット釦 正常 ☒	排水 正常 ☒
運転/停止釦 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
アルコールモード釦 正常 ☒	オゾンインジケータ 正常 ☒
操作パネル 正常 ☒	酸素発生 正常 ☒
蛍光灯 正常 ☒	水漏れ確認 装置外 正常 ☒
フタロック 正常 ☒	水漏れ確認 装置内 正常 ☒
給水 正常 ☒	洗浄コネクタ 正常 ☒
細管洗浄 順方向 正常 ☒	洗浄チューブ 正常 ☒
細管洗浄 逆方向 正常 ☒	
細管洗浄 エアパージ 正常 ☒	
アルコールフラッシュ 正常 ☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置情報	総運転回数: 1,088 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	交換後運転回数: 170 回
酸素発生	濃度: 92.0 %	流量: 0.76 L/min	圧力: 109 ~ 195 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. SPS-11080 → NO. SPS-11595
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 横山

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店	責任技術者	作業者
	大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1		中山
	TEL: 06-6228-3311		