

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 9月 16日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300091	
作業年月日	平成 26年 9月 16日		作業時間	:	Hr
顧客名	新神戸ドック健診クリニック 御中		電話番号	: 078-261-6736	
所在地	神戸市中央区熊内町7丁目6-1 ジーパーク新神戸タワー2階		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 9月 25日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 705
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 137 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒: 49 回	消毒+アル: 88 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 93 回	アルコール単独: 4 回	エア単独: 42 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12081153 → NO.12061083
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.120801-035 → NO.091218-006
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
2014 年 9 月 16 日	
ご署名 大橋 由美子	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山