

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 9月 24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100224	
作業年月日	平成 26年 9月 24日		作業時間	:	Hr
顧客名	箕浦医院 御中		電話番号	: 072-332-2882	
所在地	大阪府松原市天美東6-18-37		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 23年 4月 1日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐		修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ E: 214 レベルセンサ異常が14回発生し、使用出来なくなった。

不具合原因、作業内容

- ・ コントロール基板が誤作動していた為、E: 214 レベルセンサ異常が発生していた。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 389
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

- ・ コントロール基板を交換後、正常に作動した事を確認し終了。

装置情報	交換後運転回数: 204 回	更新 (リセット) 実施: ☒ 未実施	殺菌: 79 回	殺菌+アル: 127 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
コントロール基板		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 NO, 0707010880 → NO, 0611410972

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2024年 9月 24日

ご署名

箕浦 俊之

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山