

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 26年 9月 11日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |    |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                               | 製造番号                                                             | : 300102                                      |    |
| 作業年月日 | 平成 26年 9月 11日                            |                               | 作業時間                                                             | :                                             | Hr |
| 顧客名   | 中川クリニック 御中                               |                               | 電話番号                                                             | : 072-243-0100                                |    |
| 所在地   | 大阪府堺市堺区出島町2-6-24 山田ビル2階                  |                               | ご担当                                                              | 院長先生 様                                        |    |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |    |
| 納入年月日 | 平成 25年 9月 30日                            | 保証期間                          | 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                           |    |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 1年 1回目                                                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                  |                                               |    |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |           |                                                    |
|----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 406    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                                    |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |               |                     |              |             |
|----------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 39 回 | 更新 (リセット) (実施) ・未実施 | 消毒: 6 回      | 消毒+アル: 35 回 |
|          | リークチェック: 0 回  | 自己洗浄: 0 回           | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回   |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                             |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO.12081139 → NO.12061084    |
| 排水フィルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサ NO.120801-017 → NO.091125-027 |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、                |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      | コネクタ継手の4点は製造番号なし                     |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                      |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26年 9月 11日

医療法人幸福会 中川クリニック

ご署名 理事長 中川 義 衛

|      |                   |       |     |
|------|-------------------|-------|-----|
| 修理業者 | 新鋭工業 株式会社 大阪支店    | 責任技術者 | 作業者 |
|      | 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 |       | 中山  |
|      | TEL: 06-6228-3311 |       |     |