

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 9月 29日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号	: 300241
作業年月日	平成 26年 9月 29日	作業時間	: Hr
顧客名	はり内科クリニック 御中	電話番号	: 079-454-8510
所在地	兵庫県加古川市加古川町粟津770-18	ご担当	院長先生 様
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成 26年 3月 24日	保証期間	内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

「E:402」排水異常が発生。

不具合原因、作業内容

排水フィルター・の目詰まりにより、エラーが発生。

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレイ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 304
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水フィルター、脱気フィルターを交換し、正常に作動。

装置情報	交換後運転回数: 70 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 3 回	消毒+アル: 68 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 66 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
排水フィルター	(新型)	☒	1個	オゾンセンサー NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
脱気フィルター		☒	1枚	コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年 9月 29日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

中山