

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 10月 1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	: 100739
作業年月日	平成 26年 10月 1日	作業時間	: Hr
顧客名	まちだ内科クリニック 御中	電話番号	: 0739-33-8282
所在地	和歌山県田辺市下三栖1257-4	ご担当	院長先生 様
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成 25年 6月 24日	保証期間	内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ 9/27 (土) 『E: 100』オゾンセンサ異常、『E: 103』排気ファン故障、『E: 104』エアライン低圧異常、『E: 400』ドレンモニタ異常が発生。

不具合原因、作業内容

- ・ プログラムが誤作動を起こし、エラーが発生。

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレイ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒

バルブ数 432

履歴 0.71 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

- ・ プログラムをVer0105→Ver0107に変更。

装置 情報	交換後運転回数: 353 回	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 353 回	殺菌+アル: 0 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

河村 和生

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山