

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成 26年 9月 26日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300264	
作業年月日	平成 26年 9月 25日		作業時間	:	Hr
顧客名	医療法人敬愛会 大塚病院 御中		電話番号	: 0795-82-7534	
所在地	兵庫県丹波市氷上町絹山513		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 5月 15日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修 理 ☒	点検のみ ☐		修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴
・ 9/16（火）から9/25（木）の間に『E：110』オゾン水生成注意が6回、『E：302』濃度維持異常が4回発生。

不具合原因、作業内容
・ 脱気フィルターが目詰まりを起こしていた為、エラーが発生しました。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 472
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・ 脱気フィルター（新型）を交換し終了。

装置 情報	交換後運転回数： 147 回	更新（リセット）実施 ・ 未実施	消毒： 20 回	消毒＋アル： 128 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 80 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
脱気フィルター		☒	1枚	コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1－6－1 TEL：06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山