

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 26年 12月 18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100095	
作業年月日	平成 26年 12月 18日		作業時間	:	Hr
顧客名	アエバ外科病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府大阪市生野区勝山南4-6-5		電話番号	:	06-6715-0771
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 22年 9月 16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 543
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 137 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 20 回	殺菌+アル: 118 回
	リークチェック: 3 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.100/0093 → NO.100/0130
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.091216-006 → NO.101027-001
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄		
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
年 月 日		
ご署名 富 銘 弘 子		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山