

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 10月 14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	: 100324
作業年月日	平成 26年 10月 14日	作業時間	: Hr
顧客名	上田医院 御中	電話番号	: 0795-22-3040
所在地	兵庫県西脇市野村町865-5	ご担当	院長先生 様
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成 23年 10月 25日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴																																													
不具合原因、作業内容																																													
点検項目 <table> <tr> <td>フタロック</td><td>正常 ☒</td> <td>殺菌槽 LED</td><td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>酸素ライン</td><td>正常 ☒</td> <td>エアライン</td><td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>アルコールライン</td><td>正常 ☒</td> <td>オゾン水濃度計動作</td><td>正常 ☒ ハル数 402</td> </tr> <tr> <td>オゾンセンサ</td><td>正常 ☒</td> <td>排水栓、排水ライン</td><td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>給水ライン</td><td>正常 ☒</td> <td>細管送水ライン</td><td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>濃度計流量</td><td>正常 ☒</td> <td>排気ライン</td><td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>水位センサー</td><td>正常 ☒</td> <td>オゾン濃度</td><td>正常 ☒ 履歴 0.70 ppm</td> </tr> <tr> <td>水漏れ確認</td><td>正常 ☒</td> <td>異常音、振動</td><td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>清掃</td><td>正常 ☒</td> <td>電源コード</td><td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>トレー</td><td>正常 ☒</td> <td>殺菌チューブ類</td><td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>殺菌槽コネクタ</td><td>正常 ☒</td> <td></td><td></td> </tr> </table>		フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 402	オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm	水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒																																										
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒																																										
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 402																																										
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒																																										
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒																																										
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒																																										
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm																																										
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒																																										
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒																																										
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒																																										
殺菌槽コネクタ	正常 ☒																																												
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項																																													

装置 情報	交換後運転回数: 258 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 21 回	殺菌+アル: 766 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 707 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11020582 → NO. 14071868
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 130717-003 → NO. 141002-003
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	26 年 10 月 14 日 ご署名 上田 医院
---	--

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山