

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 26年 11月 18日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300133	
作業年月日	平成 26年 11月 18日		作業時間	: Hr	
顧客名	由井クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県神戸市西区糺台5丁目10番2号 西神センタービル3階		電話番号	: 078-991-5858	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 11月 11日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	1年 1回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 408
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 111回	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	消毒: 4回	消毒+アル: 108回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 106回	アルコール単独: 0回	エア単独: 6回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12101193 → NO.09120007
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO.121002-021 → NO.081029-006
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	〒651-2273 兵庫県神戸市西区糺台5-10-2
	医療法人社 由井クリニック
	院長 由井 治郎 TEL 078-991-5858

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山