

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-17891

No. 141105

納入先	新鋭工業（株）大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	京都府北区柴竹下ノ岸町21-1		機番	001219
ユーザー名	たけだ医院 様		納入日	平成20年1月1日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年8月7日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成26年10月31日

修理依頼・異常内容

洗浄中に異音が発生した

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

運転条件を振って運転したところ、発生頻度は少ないですが異音を確認しました。
異音の発生源は水ポンプでこれを交換しました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換及び水槽補修（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.45～0.57 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.3 % 酸素流量：0.74 L/min 圧力：0.122～0.213 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
- 運転回数：4591

一以上一

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	水ポンプ（P-1 オゾン水製造ポンプ）	1台	
	水ポンプ（P-2 内視鏡洗浄ポンプ）	1台	
	水ポンプ（P-3 排水ポンプ）	1台	
	水位レベルセンサー	3本	LVL、LVH、LVHH
	チューブ、パッキン	1式	分解点検に伴う。今回無償

承認



審査



作成

H26. 11. 5

中澤