

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 26年 11月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100503	
作業年月日	平成 26年 11月 27日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	藤民病院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県和歌山市塩屋3丁目6番2号		電話番号	: 073-445-9881	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 24年 6月 21日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 528
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 14 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 27 回	殺菌+アル: 12 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.100/0032 → NO.12/01/92
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.130807-015 → NO.09/125-009
コントロール基板		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 No.0314/10892 → No.07/04/0973

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名 医療法人 藤民病院	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山