

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 26年 12月 5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100577	
作業年月日	平成 26年 12月 5日		作業時間	:	Hr
顧客名	三木内科クリニック 御中		電話番号	: 079-443-8500	
所在地	兵庫県高砂市荒井町中新町5-3		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 24年 12月 14日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルス数 503
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 245 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 221 回	殺菌+アル: 216 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 208 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10050242 → NO.10040634
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.130725-032 → NO.100212-016
コントロール基板		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 No.0729110892 → No.0630410972
		☐		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
ご署名 藤原

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山