

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 12月 8日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300114	
作業年月日	平成 26年 12月 8日		作業時間	: Hr	
顧客名	井上クリニック 御中		電話番号	: 072-334-5050	
所在地	大阪府松原市田井城1丁目1-1 デイリーカート松原1階		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 10月 2日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴
12/3(水)~12/6(土)の間に「E:111、排水注意」が6回、「E:401、排水異常」が1回発生した。

不具合原因、作業内容
排水フィルターが目詰まりにより、上記のエラーが発生したと思われ、排水フィルター-の交換をしました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 479
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
正常に作動した事を確認し終了しました。

装置情報	交換後運転回数: 115 回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	消毒: 254 回	消毒+アル: 332 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 19 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, ☒ → NO, ☒
排水フィルター	(新型)	☒	1個	オゾンセンサー NO, ☒ → NO, ☒
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 木木

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山