

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 26年 12月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100565	
作業年月日	平成 26年 12月 10日		作業時間	:	Hr
顧客名	せと肛門胃腸クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	滋賀県大津市小野375番地1		電話番号	:	077-594-8533
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 24年 10月 31日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 483
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	1590回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌:	4753 回	殺菌+アル:	0 回
	リークチェック:	1 回	自己洗浄:	250 回	アルコール単独:	0 回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10120497 → NO.11100785
給水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO.140314-001 → NO.100105-013
コントロール基板		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 No.061010892 → No.0919410973

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山