

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 12月 1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100566	
作業年月日	平成 26年 12月 1日		作業時間	:	Hr
顧客名	竹村クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府大阪市都島区都島本通3-7-8		電話番号	:	06-6921-3541
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 24年 11月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 568
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1620回	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 2051 回	殺菌+アル: 1107 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 104 回	アルコール単独: 12 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.11030611 → NO.10090393
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.130725-038 → NO.100216-012
コントロール基板		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 No. 0610110892 → No. 0630410972

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山