

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 11月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100325	
作業年月日	平成 26年 11月 19日		作業時間	:	Hr
顧客名	姫路市国民健康保険家島診療所 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県姫路市家島町宮2169番地		電話番号	:	079-325-0485
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 23年 11月 7日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☒	2年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 7/2
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 178回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 120回	殺菌+アル: 344回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 237回	アルコール単独: 1回	エア単独: 148回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.100/0053 → NO.11060652
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.130807-016 → NO.081105-006
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 姫路市国民健康保険家島診療所		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山