

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-18220

No. 141021

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 大阪支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	矢野医院 様			機番	300146
環営	所在地	和歌山県紀の川市桃山町調月 769-100			納入日	平成 25 年 11 月 22 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 26 年 9 月 29 日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 26 年 10 月 17 日
計	3					

修理依頼・不具合内容

消毒+アルコール運転で、アルコールの減りが悪い

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

不具合内容が再現することを確認しました。
内部点検したところ、アルコール電磁弁（SV13）が故障しており、これが原因でアルコールの減りが悪い状態になっていました。
また、アルコールタンク内にアルコールとは別の薬剤が残っておりました。

写真：交換部品一式



[2] 作業内容

- 1：部品交換（写真と下表をご参照ください）
- 2：運転プログラムバージョンアップ Ver0204⇒Ver0205 お客様の操作は変更ありません
- 3：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.70ppm・正常
- 4：運転確認・・・正常

お願い：故障の原因になりますので、タンクにはアルコール以外の薬品を入れないでください。

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	アルコール電磁弁	1	SV13
	アルコールタンクキャップ	1	
	アルコールラインフィルタ	1	
	アルコールドレンチューブ	1	
	水槽ドレンチューブ	1	

承認



審査



作成

H26. 10. 21

中澤

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528