

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	03-18129	No. 150105
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	兵庫県尼崎市西灘波町 3-23-8 ルネ西灘波 1F	機番	000423
環営	ユーザー名	かもいクリニック 様	納入日	平成16年9月17日
	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成26年9月19日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成26年12月27日

修理依頼・苦情内容

エラー6（PSA異常）頻発

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

PSA（酸素発生器）を構成する6個の電磁弁のうち、1個（SV-35）が故障しており、これを圧力センサが検知してエラー6が発生しました。
この電磁弁を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換（下表および写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.56～0.61 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.3% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.099～0.177 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
- 運転カウンタ・・・1220回（H21年メンテナンス交換時の224回を996回に加算した）

—以上—

承認
安 75.1-5 田
審査
中 27.1-5 澤
作成
H27.1.5 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	定期交換部品 吸着筒、吸湿筒、分解触媒、ドレンフィルター	1式	SPS-11638
762302330	PSA電磁弁	1式	SV-35
	排水シリコンチューブ	1本	今回無償
	下部フィルター、パッキン	1式	今回無償