

# 修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号	03-17966	No. 150119
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	京都府福知山市字堀東小谷ケ丘 1306-2	機番	001629
環営	ユーザー名	大西内科医院 様	納入日	平成21年3月25日
	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	平成26年8月22日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成27年1月16日

## 修理依頼・苦情内容

平成26年8月 豪雨災害により水没

## 不具合原因 (故障箇所) と処置予定

### [1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

床面より50cmの高さまで、水に浸かった形跡がありました。  
機械も動作せず、水に浸かった部品を全て取り替えて復旧いたしました。

写真1：見積書に無い部品 (今回は無償です)

写真2：見積書にある部品



### [2] 修理・点検内容

1. 部品交換 (下表および写真をご参照ください)
2. オゾン水濃度測定: 0.48~0.59 mg/L ・ ・ 正常
3. PSA (酸素発生装置) 性能点検 ・ ・ 正常  
酸素濃度: 93.1% 酸素流量: 0.76 L/min 圧力: 0.094~0.172 MPa (AC100V、60Hz)
4. 運転動作確認 ・ ・ 正常
5. オゾンインジケータ変色 ・ ・ 正常、運転カウンタ ・ ・ 784回

—以上—

## 交換部品

部品の分類	部品名称	数量	備考
定期交換部品	吸着筒、吸湿筒、オゾン分解触媒、ドレンフィルムASSY	1式	全て新品 (SPS-11629)
ポンプ類	エアコンプレッサ、水ポンプ、エアポンプ	1式	水ポンプは新品
電磁弁類	アルコールバルブ、PSA切替弁ASSY、排水電磁弁	1式	
センサ類、配管チューブ	水位レベルセンサ (LVL)、PSA およびポンプ類チューブ	1式	全て新品
電気部品	蛍光灯、リセットSW、電線、分解ASSY、パネルSW	1式	SWはスイッチの略
減圧弁	減圧弁	1個	

承認	安田 15.1.19
審査	中澤 27.1.19
作成	
H27.1.19 中澤	

写真1:機械全景



写真2:床面より50cm(黄色いテープ貼り付け)



写真3:正面



写真4:背面



写真5:右側面



写真6:左側面

