

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20141224

発行日 平成 26年 12月 24日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号:	300010
作業年月日	平成26年 12月 24日	作業時間:	Hr
顧客名	多可赤十字病院 様	TEL:	0795-32-1223
所在地	兵庫県多可郡多可町中区岸上280	担当	様
販売店	様	担当	様
納入年月日	平成25年 3月 18日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/24 11:03 排水注意発生。大きな音が出た。

→排水ポンプから？

不具合原因、作業内容

排水フィルタを分解したところ 繊維状の物が詰まっていた。

排水フィルタを交換し、排水ポンプを分解清掃して復旧しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐ 未実施	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 466
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

予防的に ②～④ の部品を交換し、運転が正常に 0204→0207 に
書き換えました。お客様の操作上の変更点はありません。

装置 情報	交換後運転回数: 405	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 259	消毒+7L: 354
	リークチェック: 182	自己洗浄: 130	アルコール単独: 1	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
① 排水フィルタ		☒	1			☐	
② アルコールタンクキャップ		☒	1			☐	
③ 殺菌槽コネクタ		☒	2			☐	
④ 酸素フィルタ		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

永尾 剛

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

