

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 03-17427 No. 140916

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	神戸市中央区波止場2番1号	機番	001920
環営	ユーザー名	ホテルオークラ神戸クリニック 様	納入日	
	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成26年5月30日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成25年9月16日

修理依頼・苦情内容

水槽底より水漏れ (総合メンテナンスご契約ユーザー様)

不具合原因（故障箇所）と処置予定


[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

洗浄槽底部の亀裂を確認しました。何らかの衝撃が加わって底部が割れたと推測します。
今回は水槽を交換しました。（写真をご参照ください）

また総合メンテナンス契約に伴い、性能劣化部品および定期交換部品の交換を実施しました。

写真1：水槽亀裂部分（黄色いテープのところ）

写真2：交換部品一式

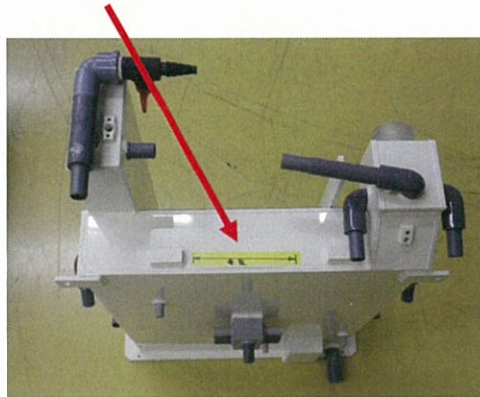

[2] 修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.5 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.114～0.197 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
運転カウンタ：7550回

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
安 14.9.16 田		水槽	1式	キャップ、フィルタ1含む
審査		定期交換部品	1式	
中 26.9.16 澤		吸着、吸湿筒、触媒、ドレンフィルタ		SPS-11555
作成		水位レベルセンサ	3本	LVL、LVH1、LVH2
H26. 9. 16		水ポンプ、配管チューブ	3台	P-1、P-2、P-3
中澤		フタスプリング	4個	