

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 1月 23日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300158	
作業年月日	平成 27年 1月 23日		作業時間	:	Hr
顧客名	なべたに内科クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県姫路市飾西492-1		電話番号	:	079-266-1515
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 26年 1月 14日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 482
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 85 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒: 2 回	消毒+アル: 84 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12091162 → NO.11120826
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO.121022-004 → NO.100706-008
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 金岡 公重 吉

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山