

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 2月 2日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300184	
作業年月日	平成 27年 2月 2日		作業時間	:	Hr
顧客名	宮崎クリニック 御中		電話番号	: 0795-73-5501	
所在地	兵庫県丹波市柏原町南多田686-1		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 2月 12日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 394
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 675 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・ 未実施 ☐	消毒: 249 回	消毒+アル: 427 回
	リークチェック: 4 回	自己洗浄: 228 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12111227 → NO.10060295
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.121024-024 → NO.110614-012
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
コントロール基板		☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 No.0204310970 → No.0919410973

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27年 2月 2日

ご署名 宮崎直之

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山