

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150203  
発行日 平成 27年 2月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100309
作業年月日	平成27年 2月 3日	作業時間:	Hr
納入予定	しらはま内科クリニック 様	TEL:	
所在地	大阪府	担当	様
付属品	トレ、電源コード、給水ホース、排水ホース、ポンパント、取説、簡易取説、添付文書、リハス用チューブ (E-100, 101, 102, 104)		
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入	<input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付	<input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

中古医療機器販売に伴う点検整備

不具合原因、作業内容

保守点検作業とオゾン水系統の配管チューブを交換しました。  
取扱説明書の内容を最新版に修正しました。

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 542
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置情報	交換後運転回数: 182 → 0 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施	殺菌: 4	殺菌+アル: 178
	リークチェック: 0	自己洗浄: 133	アルコール単独: 0
		エア単独: 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1個	内視鏡接続コネクタ		<input checked="" type="checkbox"/>	2個
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1個	配管チューブ		<input checked="" type="checkbox"/>	1式
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1個	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3個
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1枚			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1個			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

工場点検につき不要です

ご署名 印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者

写真1: 製造銘板

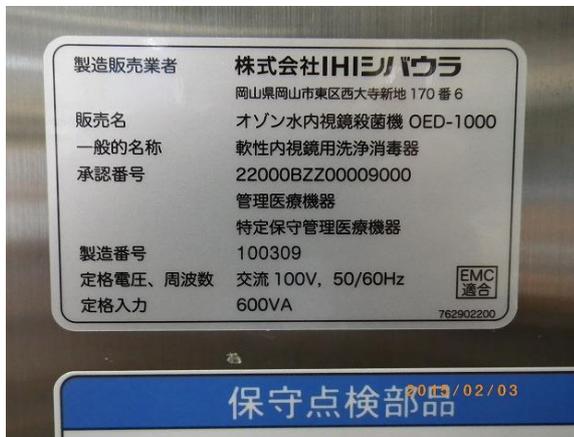


写真2: タッチパネル; 装置情報

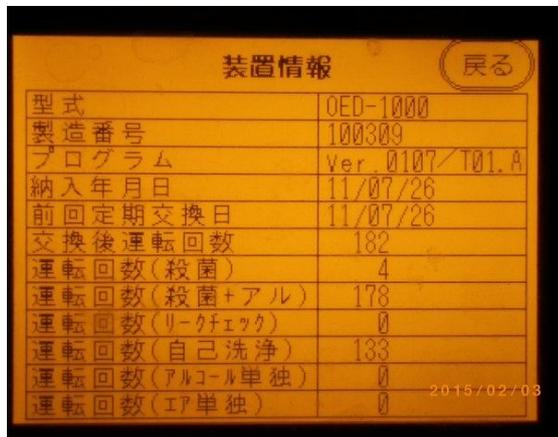


写真3: 定期交換部品

オゾン分解触媒、吸盤、オゾン水濃度計フィルター



写真4: 定期点検部品一式

オゾン水濃度計、オゾンセンサー



写真5: 配管チューブ 一式

