

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150212
発行日 平成 27年 2月 12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100771
作業年月日	平成27年 2月 12日	作業時間:	Hr
顧客名	いけじり内科外科クリニック 様	TEL:	06-6180-1100
所在地	大阪府大阪市城東区関目6-7-8	担当	様
販売店	ニスコ(株) 様	担当	様
納入年月日	平成25年 6月 5日	保証期間	内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

H26年10月6日より排気ファン故障(E:103)25回発生

不具合原因、作業内容

オゾン水濃度計より溢れた水が排気ファンにかかり故障していました。
この部品で交換して復旧しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 653
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 78	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 2	殺菌+アル: 237
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
排気ファン		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015年 2月 12日

ご署名 池尻真康 印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
	