

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-05086

No. 090114

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	兵庫県尼崎市南武庫之荘 1-14-3			機番	000515
環営	ユーザー名	滝内科胃腸科医院 様			納入日	平成 15 年 10 月 10 日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 20 年 12 月 5 日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 21 年 1 月 14 日
計	3					

修理依頼・苦情内容

・洗浄中に異音がする。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・17回運転中2回異音を確認し、残り15回は正常に運転できました。
ONWには水ポンプを3台搭載しており、その内の1台で内視鏡洗浄用ポンプ（P-2）が一次洗浄中に2回サイレンのような異音を発生しました。
- ・サブタンク内に折れたトレーピンが落ちていたので取り除きました。
- ・洗浄槽下側フィルター（フィルター1）のつまみが消失していたので交換しました。（無償）
- ・運転カウンタ 5016回

[2] 修理・点検内容

- 水ポンプ交換
- 給水ライン分解清掃（定流量弁）
- オゾン水濃度測定：0.48～0.57mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.0% 酸素流量：0.78 /min 圧力：0.123～0.216Mpa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

推奨 交換 部品

承認				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
作成		水ポンプ P-2	1	内視鏡洗浄用
		フィルター1	1	
H21.1.14 中澤				