

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-07137

No. 100117

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	兵庫県尼崎市南武庫之荘 1-14-3			機番	000515
環営	ユーザー名	滝内科胃腸科医院 様			納入日	平成 15 年 10 月 10 日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 21 年 11 月 6 日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 22 年 1 月 12 日
計	3					

修理依頼・苦情内容

- ・ 洗浄中に異音がする。

修理履歴：平成 20 年 12 月に水ポンプ（P-2）交換。運転カウンタ 5016 回

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・ 10 回運転して、異音は発生しませんでした。水ポンプ（P-1）からゴロゴロ音がして劣化の兆候が見られました。
- ・ 運転カウンタ 6367 回



[2] 修理・点検内容

1. 水ポンプ、オゾンセンサ交換（写真参照）
2. 給水ライン分解清掃（定流量弁）
3. オゾン水濃度測定：0.53～0.62mg/L・・・正常
4. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：93.0% 酸素流量：0.79 /min 圧力：0.105～0.185Mpa（AC100V、60Hz）

5. 運転動作確認・・・正常
6. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

推奨 交換 部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
江 22.1.18 口		水ポンプ P-2	1	オゾン水製造用
審査		水ポンプ P-3	1	排水用
江 22.1.18 口		オゾンセンサ	1	
作成				
H22. 1. 18 中澤				