

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 4月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100219
作業年月日	平成 27年 4月 16日		作業時間	: Hr
顧客名	河島医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-1-24		電話番号	: 06-6629-2110
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 23年 4月 6日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 348
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107/TOL.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 385 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 7 回	殺菌+アル: 1717 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 7055 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 4011670 → NO. 12051060
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 40318-008 → NO. 130730-005
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄		年	月	日
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名			 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山