

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年4月2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100468
作業年月日	平成27年3月30日		作業時間	: Hr
顧客名	邦和病院 御中		ご担当	: 林検査室長 様
所在地	大阪府堺市中区新家町697-1		電話番号	: 072-234-1331
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 24年 3月 16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラーナンバー E:210 ... 光量低下異常) 左記エラーのため保守点検内容に含まれる
 エラーナンバー E:212 ... ランプ点検異常) 消耗品の交換が必要と判断。
 ※交換後 復帰。

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 461
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 138 回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 165 回	殺菌+アル: 574 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. → NO.
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

岡田