

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 5月 1日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300041	
作業年月日	平成 27年 5月 1日		作業時間	:	Hr
顧客名	野木病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県明石市魚住町長坂寺1003-1		電話番号	:	078-947-7272
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 7月 30日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水注意 (E:111) が発生。

不具合原因、作業内容

排水フィルターの目詰まりが原因。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 465
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0204/T02.B

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

排水フィルターを交換し終了。

装置 情報	交換後運転回数: 553 回	更新 (リセット) 実施・ ☒ 未実施	消毒: 163 回	消毒+アル: 1060 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 331 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, ☒ → NO, ☒
排水フィルター	新型	☒	1個	オゾンセンサー NO, ☒ → NO, ☒
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

中西

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山